

Chromed CpG 骨髓细胞培养添加剂

Chromed CpG 骨髓细胞培养添加剂 由 CpG-ODN DSP30和 rH-IL-2组成，可以有效刺激人B淋巴细胞的分裂，主要应用于慢性淋巴细胞白血病（Chronic Lymphocytic Leukemia, CLL）骨髓或外周血B淋巴细胞培养，以及慢性B淋巴细胞增殖性疾病（B-cell lymphoproliferative syndrome）的细胞培养，进行细胞遗传学分析，提高染色体异常检出率。

『包装规格』

1*1mL/管，8*1 mL/管。

『技术特点』

- ✚ 使用和添加方便，可以针对CLL标本应用。
- ✚ 有效提高染色体异常检出率。
- ✚ 优化组分，添加稳定剂。
- ✚ CpG-ODN 经完全硫代化修饰，可以有效防止细胞内DNA酶对ODN的降解。

『使用方法』

- 骨髓细胞培养前，将Chromed CpG细胞培养添加剂添加到骨髓细胞培养基中（Chromed M，货号：CM-M）培养基中，每5mL培养基添加100 μ L。
- 细胞培养72小时后，按常规方法收获细胞，进行染色体G显带和R显带分析。

『产品保存』

<-20 $^{\circ}$ C 避光保存，有效期6个月。4 $^{\circ}$ C避光保存不超过7天。反复冻融影响应用活性。

『产品订购』

货号	产品描述	规格	价格/¥
CM-CpG-10	Chromed CpG 骨髓细胞培养添加剂	1*1mL /管	
CM-CpG-80	Chromed CpG 骨髓细胞培养添加剂	8*1mL /管	

上海乐辰生物科技有限公司

上海市宝山区呼兰路911弄11号智汇园3号楼206室 200431

Tel: 021-51853815 400-0021-908 Fax: 021-66209682

Http://www.sinochrome.com.cn E-mail: sinochrome@163.com

Sinochrome
Solutions for cytogenetics
乐辰生物